

Руководство пользователя по установке приложения RUMЕДИУС

2025-02-07

[Установка на ПК](#)

[Обновление приложения RUMЕДИУС](#)

[Установка на смартфон или планшет под управлением Android](#)

[Установка на iOS или macOS.](#)

[Установка на шлем виртуальной реальности Quest через Meta Horizon](#)


Установка на ПК

Ссылка на скачивание дистрибутива для ПК


<https://storage.yandexcloud.net/rumediumpublic/RUMEDIUS.exe>

Запустить скачанный файл.


Если появится окно с предупреждением,

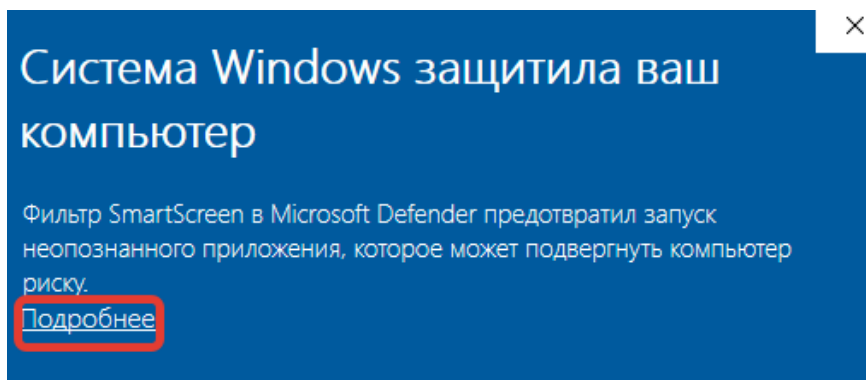


то нажать "Подробнее", "Выполнить в любом случае".

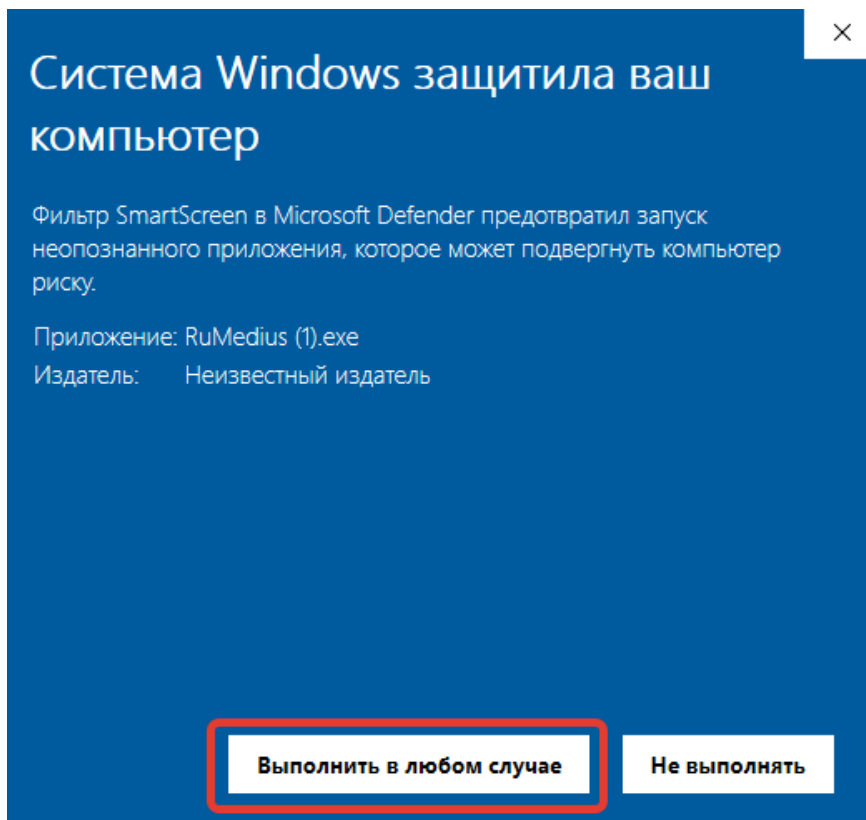

Выбрать язык установки, "ОК"

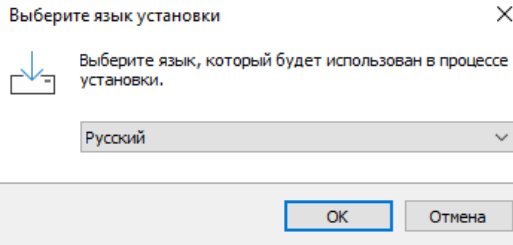


Выбрать папку установки

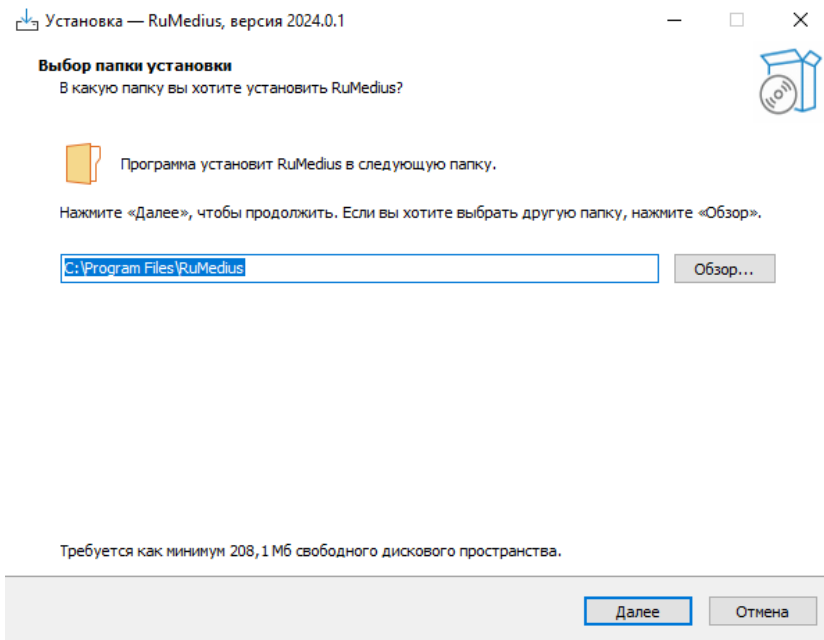


Кнопка “Далее”.

Если происходит обновление, то появится вопрос — согласиться.

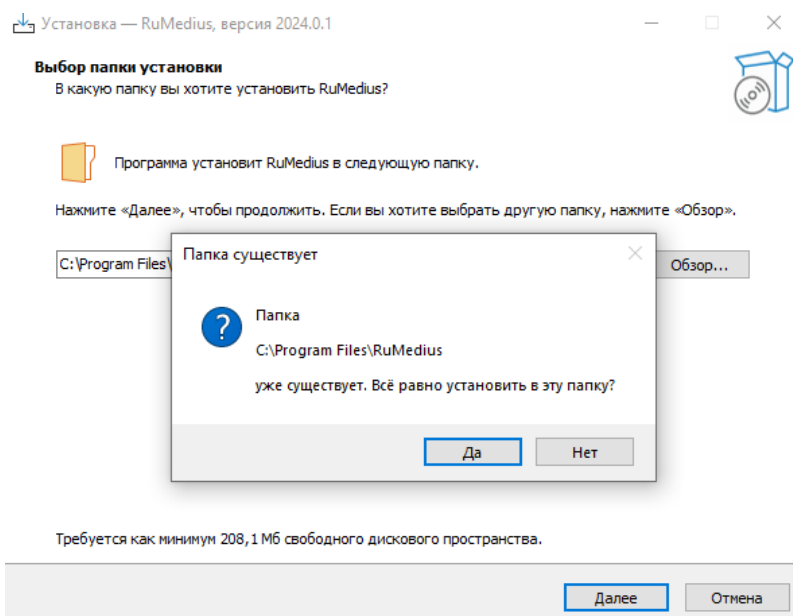


Кнопка “Далее”

Создать значок на рабочем столе?

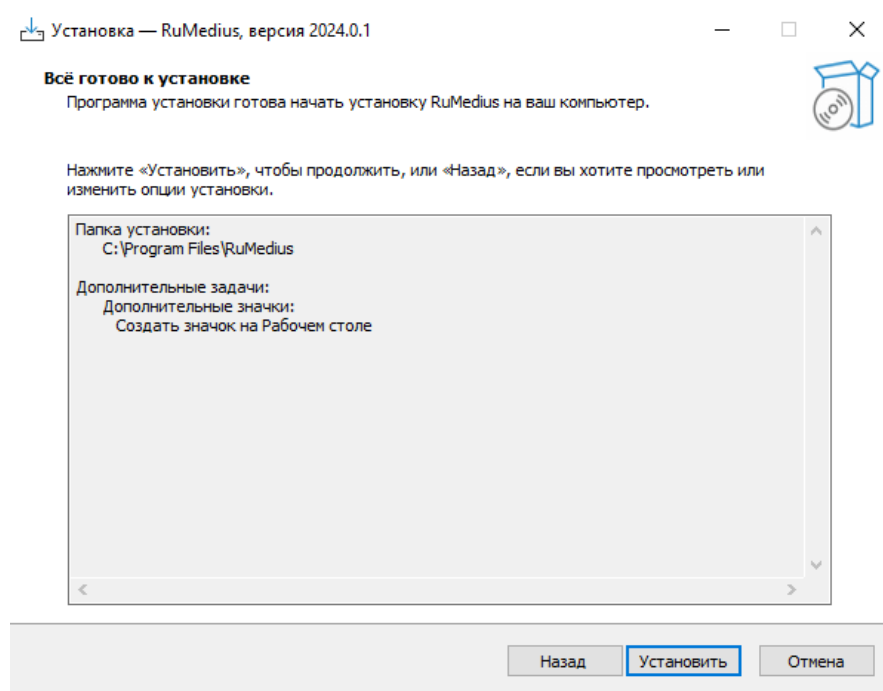

Выбрать “Установить”.


При необходимости убрать галочку “Запустить RUMЕДИУС”

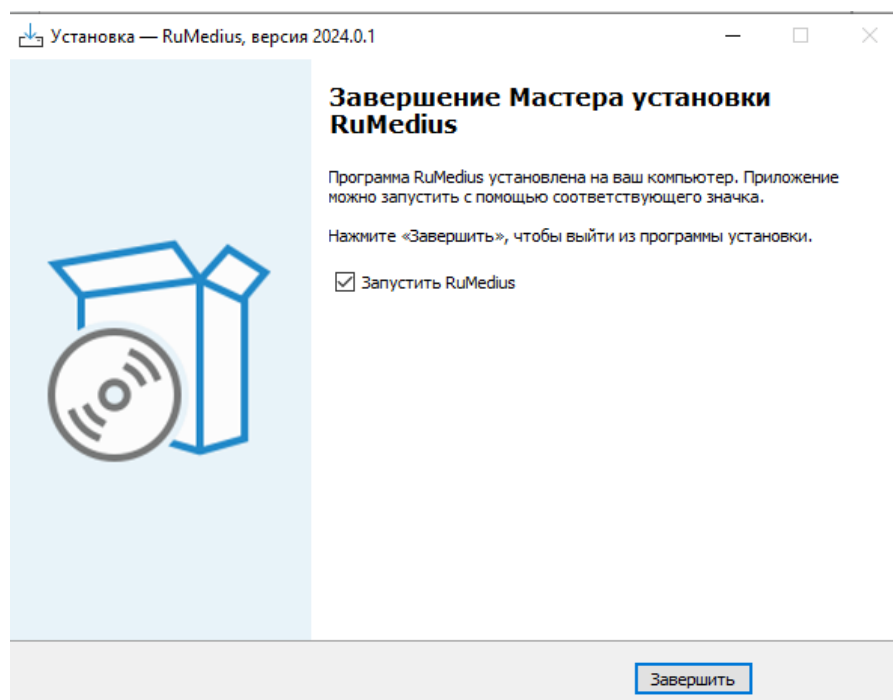

Нажать “Завершить”.

Обновление приложения RUMЕДИУС

При запуске приложение само определяет выход новой версии и при запуске предлагает обновиться.

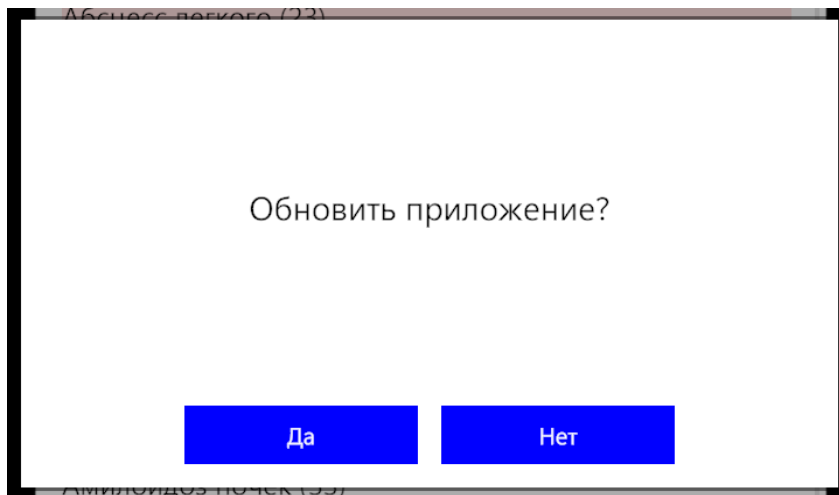

При согласии на обновление, приложение само скачивает и запускает новый установщик. После установки приложение запускается автоматически.

Установка на смартфон или планшет под управлением Android

В Play Market найти и установить приложение RUMЕДИУС

Обновление происходит автоматически, либо вручную через настройки Play Market.

При установке рекомендуется согласиться с созданием и размещением значка на рабочем столе — это обеспечит удобный доступ к быстрому старту приложения.

Установка на iOS или macOS.

В AppStore найти и установить приложение RUMЕДИУС


Обновление происходит автоматически, через App Store.

Установка на шлем виртуальной реальности Quest через Meta Horizon

Вверху главного меню виртуального шлема выбрать Поиск в Horizon Store



В строке поиска ввести “RUMEDIUS” и нажать значок Лупы. Ниже, в результатах поиска, выбрать приложение RUMEDIUS

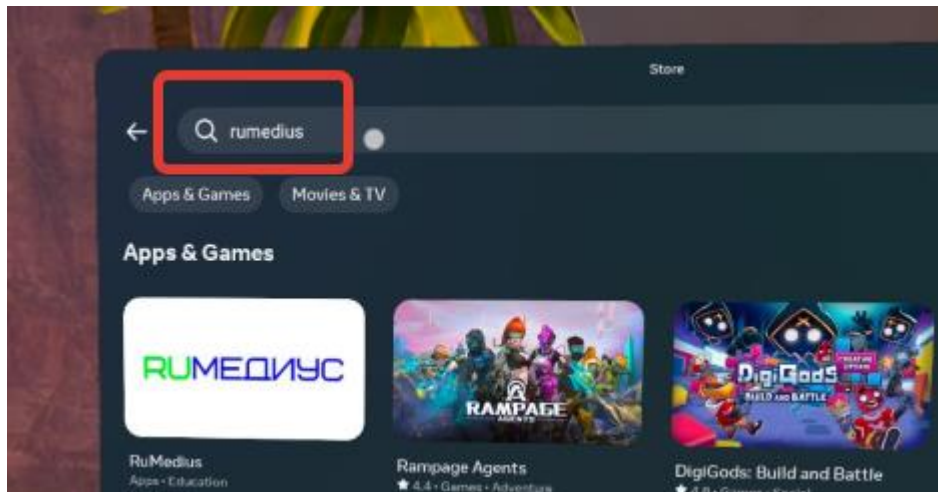

Нажать “Установить”, “Запустить”

